


WALKER EQUALIZER®

Tutore fisso per tibio tarsica cod. 0624 alto/cod. 0631 basso




GUARDA IL VIDEO
DI POSIZIONAMENTO

POSIZIONAMENTO (fa riferimento al cod. 0624)

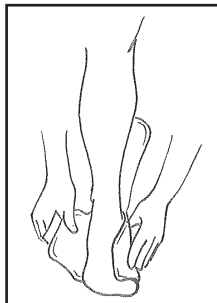




1. Aprire le cinghie dotate di chiusura a strappo, togliere l'imbottitura interna estraibile e calzarla intorno al piede e al polpaccio.

2. Per aumentare il comfort si possono inserire, all'interno dell'imbottitura e vicino ai malleoli, i cuscinetti in dotazione.

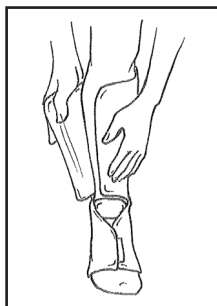

3. Chiudere l'imbottitura utilizzando le chiusure a strappo.

4. Introdurre il piede nello stivaletto divaricando leggermente i sostegni verticali. Il tallone deve essere spinto verso la parte posteriore in modo da risultare ben fermo. Posizionare la gamba in asse con i sostegni verticali.

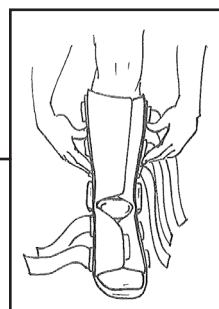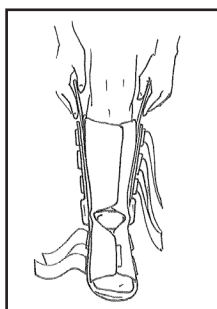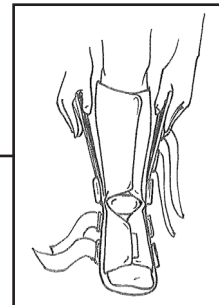

5. Sfilare dai sostegni i nastri di protezione in modo da fissare l'imbottitura allo stivaletto.

6. Chiudere le cinghie tibiali partendo dal basso in modo da ottenere una confortevole stabilizzazione. Successivamente chiudere le due cinghie sul dorso del piede

